

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

Stručná referenčná príručka

Tento návod Vám pomôže pri použití **nazálneho antigénového rýchlotestu na SARS-CoV-2**. Pred použitím tohto testu si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie pre pacientov.

Dôležité bezpečnostné informácie

Varovanie!


- Pred vykonaním testu si umyte ruky vodou a mydlom alebo použite prostriedok na dezinfekciu rúk.
- Tampónová tyčinka musí byť čistá. Nedotýkajte sa špičky tampónovej tyčinky a zaistite, aby sa pred použitím nedostala do kontaktu so žiadnym povrchom.
- Dbajte na to, aby ste na odber vzorky použili iba priložené tampónové tyčinky.

Likvidácia použitého materiálu


Likvidácia všetkých odpadových materiálov musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Použitý test zabaľte do plastového vrečka na odpad (nie je súčasťou balenia) a vyhoďte do komunálneho odpadu alebo nádoby určenej na zber biologicky kontaminovaného odpadu.

Súčasti testovacej súpravy

Testovacie zariadenie

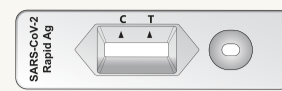

Fóliové vrečko s vysušovadlom

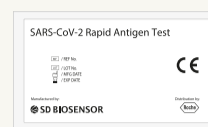

Extrakčný tlmivý roztok, skúmavka a špicatý uzáver



Sterilná tampónová tyčinka



Na vykonanie testu musíte mať pripravený tento materiál:


- Testovacie zariadenie (jednotlivo balené vo fóliovom vrečku s vysušovadlom)
- Skúmavka s extrakčným tlmivým roztokom
- Špicatý uzáver
- Sterilná tampónová tyčinka

Navše ešte potrebujete:

- Stopky/Časovač
- Plastové vrečko na zabalenie použitého materiálu

1 Príprava testu

1. Dôkladne si prečítajte návod na použitie **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal** pre pacientov.
2. Skontrolujte dátum expirácie uvedený na zadnej strane fóliového vrečka s vysušovadlom. Testovacie zariadenie po dátume expirácie nepoužívajte.
3. Otvorte vrečko na perforovanej línii a vyberte testovacie zariadenie aj vrečko s vysušovadlom.
4. Uistite sa, že testovacie zariadenie je nepoškodené a indikátor stavu vysušovadla je žltý (= vhodný na použitie).


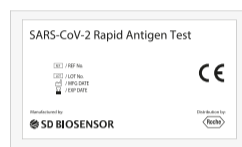


2 Odber a príprava vzorky výteru z nosa

1. Pred vykonaním testu si umyte ruky vodou a mydlom alebo použite prostriedok na dezinfekciu rúk.
2. Vyberte sterilnú tampónovú tyčinku z obalu tak, že zatiahnete za obidve slučky plastovej fólie. Pritom dbajte na to, aby ste sa tyčinky dotýkali iba na rúčke, nie na vatovej špičke.
3. Mierne zakloňte hlavu.
4. Zavedte tyčinku tampónovou špičkou do nosovej dierky. Opatrne posuňte tyčinku hlbšie, cca 2 cm (paralelne s podnebním - smerom k hltanu, nie nahor), až pocítite odpor. Netlačte.
5. Tampónovú tyčinku 4-krát otočte (celkovo cca 15 sekúnd) proti stene nosa a následne ju vyberte.
6. Opakujte kroky 4. a 5. tou istou tyčinkou v druhej nosovej dierke. **Poznámka:** Na odber vzorky z oboch nosových dierok sa používa tá istá tampónová tyčinka.
7. Tampónovú tyčinku vložte do skúmavky s extrakčným tlmivým roztokom. Skúmavku stlačte a otočte tampónovou tyčinkou viac ako 10x.
8. Počas vyberania tyčinky naďalej stláčajte skúmavku tak, aby sa z tampónu vytlačila všetka tekutina.

VAROVANIE! Ak sa skúmavka nestlačí, môže prebytok tlmivého roztoku na tampónovej tyčinke viesť k nesprávnym výsledkom.


9. Na skúmavku pevne pritlačte špicatý uzáver. Pokračujte bodom **5** **Vykonanie testu**.

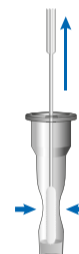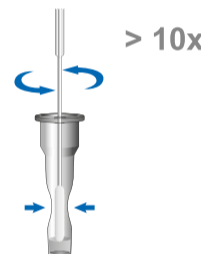

3 Vykonanie testu


1. Položte testovacie zariadenie na rovnú plochu.
2. Skúmavku držte vertikálne nad okrúhlym označeným poľom (nie nad pravouhlým oknom s výsledkom).
3. Kvapnite presne 4 kvapky na toto pole. Na tento účel skúmavku, ak je to potrebné, zľahka stlačte. **Upozornenie:** V teste môžete pokračovať aj vtedy, ak ste omylom naniesli 5 kvapiek.
4. Nastavte stopky a výsledok testu odčítajte po 15-30 minútach.

VAROVANIE! Ak výsledok testu odčítate po **viac ako 30 minútach**, môže byť výsledok nesprávny.

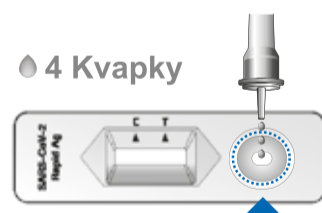

4 Interpretácia výsledkov

Neplatný výsledok testu

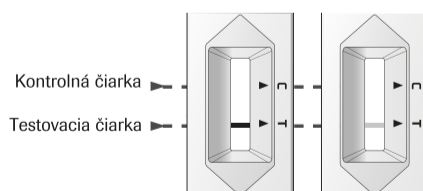


1. Ak nie je viditeľná kontrolná čiarka (C), výsledok treba považovať za neplatný (test nefunguje správne).

Dobre sa pozrite: Aj keď je kontrolná čiarka slabo viditeľná, môže byť test hodnotený ako platný.

Možno ste test nevykonali správne. Pozorne si prečítajte návod na použitie a test zopakujte. Ak je výsledok testu naďalej neplatný, kontaktujte, prosím, svojho lekára alebo testovacie centrum COVID-19.

Pozitívny výsledok testu

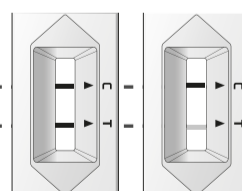


2. Prítomnosť testovacej čiarky (T), bez ohľadu na to, aká je slabá, spolu s kontrolnou čiarkou (C) znamená pozitívny výsledok testu.

Dobre sa pozrite: aj keď je testovacia čiarka slabá, test treba hodnotiť ako pozitívny.

Pozitívny výsledok znamená, že ste veľmi pravdepodobne ochoreli na COVID-19. Kontaktujte, prosím, okamžite svojho všeobecného lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva a dodržujte miestne nariadenia o karanténe. Váš lekár v prípade potreby nariadi potvrdenie pomocou PCR-testu.

Negatívny výsledok testu

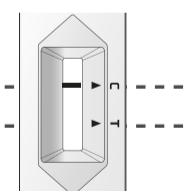

3. Prítomnosť kontrolnej čiarky (C), bez ohľadu na to, aká je slabá, avšak bez testovacej čiarky (T), znamená negatívny výsledok. Je nepravdepodobné, že ste ochoreli na COVID-19.

Aj v prípade negatívneho výsledku musíte naďalej dodržiavať všetky ochranné a hygienické opatrenia. Aj v prípade negatívneho výsledku testu môže ísť o infekciu. V prípade pochybností (tzn. keď máte pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy) odporúčame test po 1-2 dňoch zopakovať, pretože koronavírus nemožno presne dokázať vo všetkých fázach infekcie.